



Perché è importante una gestione intestinale regolare





Sappiamo che alcune persone possono avere qualche difficoltà nella gestione intestinale nel corso del tempo, come ad esempio evacuazioni frazionate, incontinenza fecale, costipazione o stipsi, **ecco perché rimanere in ascolto del proprio corpo è importante.**

Se dovessi sperimentare una di queste condizioni ti consigliamo di effettuare una visita specialistica (chirurgo, gastroenterologo, colonproctologo, ecc...) che ti consentirà di valutare tempestivamente la situazione aiutandoti ad individuare una soluzione idonea a garantirti un'adeguata qualità di vita.





Convivere con queste sfide non è obbligatorio e tra le soluzioni possibili c'è l'irrigazione transanale (TAI): un rimedio che può aiutarti a ritrovare serenità e sicurezza, grazie ad una adeguata gestione intestinale.

Peristeen® Plus è la risposta di Coloplast per attuare l'irrigazione transanale.

Questa tecnica ha lo scopo di **prevenire** l'incontinenza fecale, la stipsi e la costipazione cronica inserendo acqua nell'intestino attraverso il retto, **favorendo** uno svuotamento intestinale regolare e pianificabile.


Peristeen® Plus è stato ideato per essere **facile da utilizzare**, anche dalle persone che presentano una limitata manualità, ottimizzando il proprio tempo a disposizione.



La prevenzione di stipsi e incontinenza è data da uno svuotamento intestinale più efficace

L'irrigazione del colon con **Peristeen® Plus** svuota l'intestino e le nuove feci non raggiungono il retto prima della successiva evacuazione.

Questo permette di sentirsi tranquilli e vivere la vita più serenamente, grazie alla possibilità di programmare quando e dove evacuare.


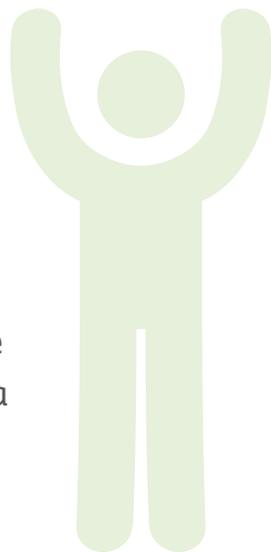




Come agisce Peristeen® Plus

Peristeen® Plus agevola la fuoriuscita delle feci dall'intestino, introducendo acqua nel colon grazie ad un catetere rettale inserito nell'ano. Successivamente l'acqua introdotta viene evacuata nel WC assieme alle feci presenti nel colon discendente, nel sigma e nel retto.

In caso di incontinenza fecale, di costipazione cronica o di entrambe, **Peristeen® Plus** può aiutare a ripristinare la regolare funzione intestinale, migliorando la sicurezza e la qualità di vita di chi lo usa.

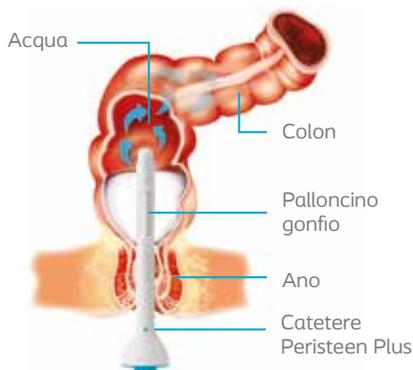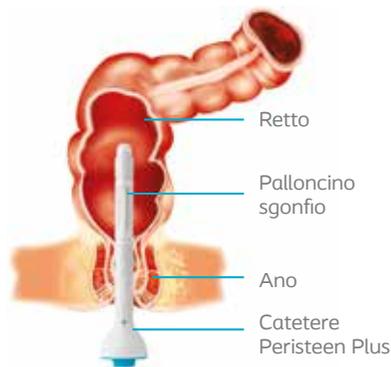

Cosa puoi aspettarti da Peristeen® Plus



Possibilità di
programmare la propria
gestione intestinale



Libertà di decidere
dove e quando poter
svuotare l'intestino



Svuotamento
dell'intestino per un
periodo fino a 2 giorni



Miglioramento
della qualità di vita

Coloplast Care: il servizio di supporto all'utilizzo di Peristeen® Plus



Coloplast Care è il nostro servizio gratuito di assistenza tecnica personalizzato, disponibile a fornirti tutte le indicazioni utili per la prova e il reperimento del prodotto. Il servizio risponde dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18 al numero verde di assistenza tecnica **800.064.064**.



Coloplast®
Care

Il tuo servizio
giorno dopo
giorno

Coloplast Care è anche online.
Seguici su: visita.coloplast.it/bowelcare



Un numero gratuito e una mail dedicati
dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18.

Numero verde di assistenza tecnica

800.064.064 utilizzatori **800.018.537** professionisti

chiam@coloplast.it

www.peristeen.it