



Coloplast



Crescere è un gioco

Queste carte sono pensate per aiutare il bambino ad acquistare una maggiore autonomia nella gestione dei propri bisogni.

Consigli d'uso

Ogni carta mostra con un semplice disegno le varie fasi della procedura.

Sul retro si trovano le istruzioni corrispondenti e una domanda di verifica.

All'inizio

Le carte possono essere il primo strumento per spiegare con facilità la procedura.

Dopo averle usate per illustrare bene ogni fase, fate un gioco: mettete le carte in ordine casuale e poi chiedete al bambino di disporle nell'ordine giusto.

Dopo qualche esperienza

Prendete una carta e, mostrando solo la figura, leggete la domanda sul retro.

Se la risposta è giusta, il bambino conquisterà la carta. Obiettivo finale sarà conquistare tutte le carte.





Coloplast

1

ISTRUZIONI

“ È tutto più facile se hai quello che serve a portata di mano, prima di cominciare. ”

DOMANDE

“ Perché è importante avere tutto quello che serve, prima di cominciare? ”





Coloplast






ISTRUZIONI

“È importante che ti lavi bene le mani prima di fare pipì, in modo da non far entrare i germi nella vescica.”

DOMANDE

“Perché devi lavarti le mani prima di fare pipì?”



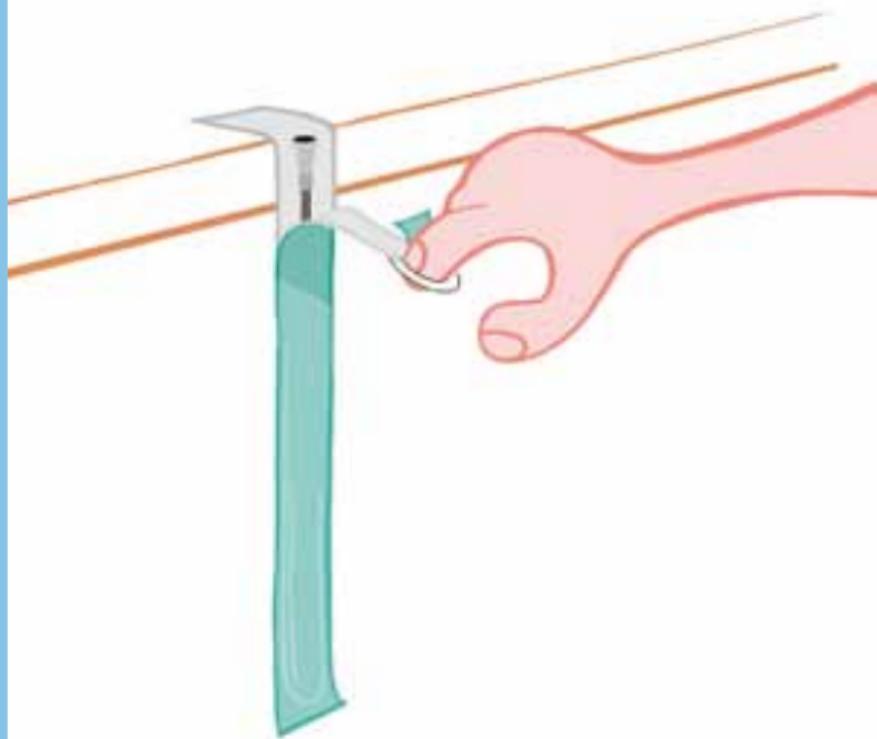



ISTRUZIONI

“ Appendi il sacchetto in una posizione comoda.
Aprilo, tirando l’anello.”

DOMANDE

*“ Cosa devi fare con il catetere,
prima di fare pipì?”*





Coloplast





ISTRUZIONI

“ Mettiti vicino al gabinetto.
Così sarà tutto più facile
quando sarai pronto per fare
pipì.”

DOMANDE

“ Dove è meglio che tu stia,
quando sei pronto per fare
pipì?”





Coloplast




ISTRUZIONI

“Lavati il pisellino prima di fare pipì: eliminerai i germi.”

DOMANDE

“Perché devi lavarti il pisellino prima di fare pipì?”



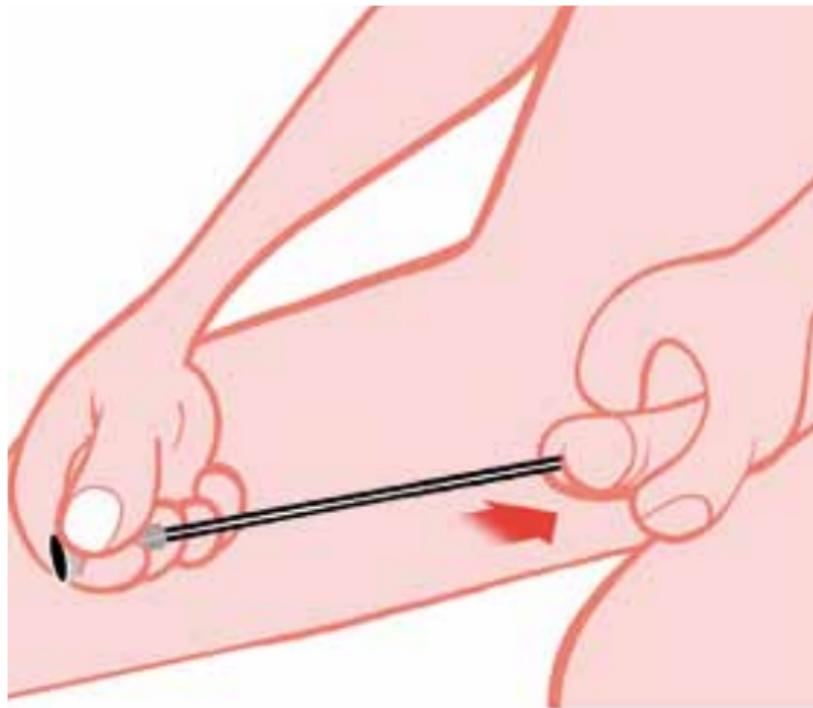

ISTRUZIONI

“ Infila delicatamente e lentamente il catetere nel forellino sulla punta del tuo pisellino fino a che non comincia a uscire la pipì. ”


DOMANDE

“ Come fai a fare uscire la pipì? ”





Coloplast

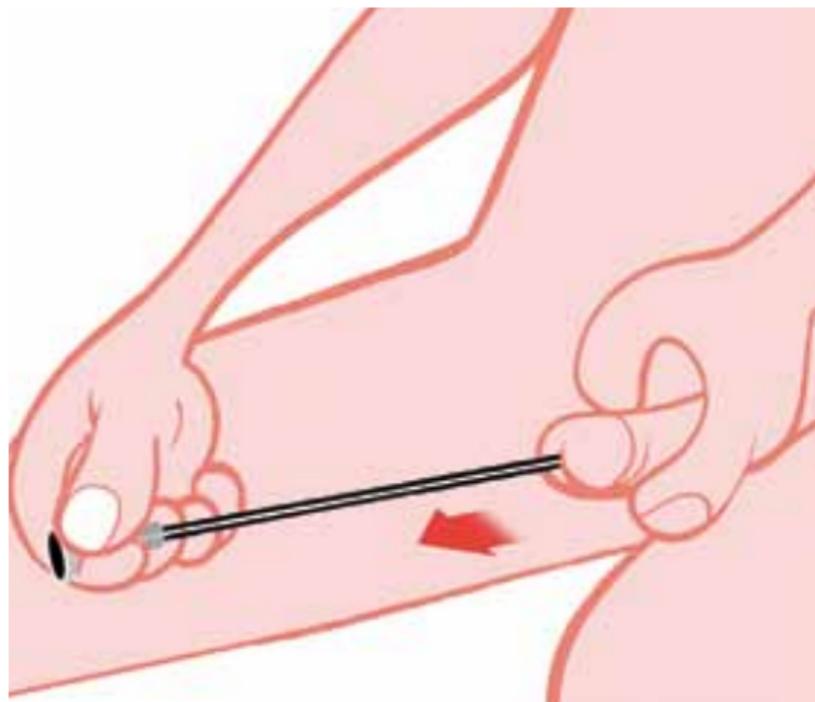



ISTRUZIONI

“ Quando il flusso della pipì si interrompe, tira fuori il catetere lentamente. Se ricomincia a uscire la pipì, fermati fino a che non smette. ”

DOMANDE

“ *A che velocità devi tirare fuori il catetere?* ”





Coloplast





ISTRUZIONI

“È importante che ti lavi bene le mani dopo avere fatto pipì, in modo da non spargere i germi.”

DOMANDE

“Perché devi lavarti le mani dopo aver fatto pipì?”





Coloplast





ISTRUZIONI

“Bravo! Hai fatto la pipì da solo!”

DOMANDE

“Perché devi essere fiero di te stesso?”

